



Fastmeditalia Srl, Sede legal: Via Fiume 25, 20832 Desio (MB) Italia. Sede operativa: Via G. Verdi 16/B, 21020 Morago (VA), Italia.
Distribuidor: Urtech Consumer Healthcare, S.L.U. Av. Generalitat, 163-167, 0874, Sant Cugat del Valles, Barcelona, España. consumidor@urtech.com



ALIVIO DA DOR MUSCULAR Y ARTICULAR



A caixa contém uma bolsa de fecho com 4 patches de 7 x 9,5 cm para uso externo.
em local fresco e seco. Mantenha os adesivos restantes na sua bolsa até usar.
de gravidez ou amamentação. Para adultos e crianças com mais de 12 anos. O produto é para uso único.
indicação evidente ou hipersensibilidade ao produto, pare o tratamento. Consulte o seu médico em caso
sua vida. Mantenha fora do alcance de crianças. Antes de usar, limpe cuidadosamente as nádegas. Se surgir
PRECAUÇÕES: Aguarde para uso externo, não aplique nos olhos e mucosas. Usar apenas em pele
como se seu fecho de correia.
pela pele, proteja na parte posterior do produto e aplique o adesivo na área que deseja tratar, deixando-o
novos se necessário, até um máximo de 30 dias consecutivos. Depois de usá-lo, feche novamente a bolsa
pequenos. Deixe o produto atuar 8 a 24 horas de acordo com suas necessidades; substitua-o por um
abert corretamente a pele. O adesivo pode ser usado após a remoção na área que deseja tratar, deixando-o

4x
Patches

O patch é composto por duas camadas: uma camada externa com faixas de cobre e zinco e uma camada interna adesiva contendo extratos de arnica e harpagofito. Quando o adesivo entra em contato com os sais minerais naturalmente encontrados na nossa pele, são geradas microcorrentes de baixa intensidade que proporcionam alívio no local da dor.
O patch tem um efeito oculto que protege as áreas do corpo que sofrem dores musculares e articulares e sais minerais naturalmente encontrados na nossa pele. São geradas microcorrentes de baixa intensidade que proporcionam alívio no local da dor.
Fisiocrem Patch Active foi desenvolvido para permitir uma boa aderência constante durante o máximo de 24 horas em todas as áreas do corpo, incluindo as promemências ósseas. A sua aderência constante garante o máximo conforto durante a atividade diária.
Fisiocrem Patch Active é a solução eficaz indicada para o tratamento de dores musculares e articulares. A exclusiva tecnologia de microcorrentes funciona para o tratamento de dores musculares, articulares e contraturas de diferentes tipos.



baixa intensidade proporcionando o conforto e atuando durante 24 horas. A microcorrente gerada é de baixa intensidade que proporciona alívio na zona da dor. O patch tem um efeito oculto que protege as áreas do corpo que sofrem dores musculares e articulares e sais minerais naturalmente encontrados na nossa pele. São geradas microcorrentes de baixa intensidade que proporcionam alívio no local da dor.
O patch é composto por duas camadas: uma camada externa com faixas de cobre e zinco e uma camada interna adesiva contendo extratos de arnica e harpagofito. Quando o adesivo entra em contato com os sais minerais naturalmente encontrados na nossa pele, são geradas microcorrentes de baixa intensidade que proporcionam alívio no local da dor.
Fisiocrem Patch Active é a solução eficaz indicada para o tratamento de dores musculares, articulares e contraturas de diferentes tipos.
baixa intensidade proporcionando o conforto e atuando durante 24 horas. A microcorrente gerada é de baixa intensidade que proporciona alívio na zona da dor. O patch tem um efeito oculto que protege as áreas do corpo que sofrem dores musculares e articulares e sais minerais naturalmente encontrados na nossa pele. São geradas microcorrentes de baixa intensidade que proporcionam alívio no local da dor.
O patch é composto por duas camadas: uma camada externa com faixas de cobre e zinco e uma camada interna adesiva contendo extratos de arnica e harpagofito. Quando o adesivo entra em contato com os sais minerais naturalmente encontrados na nossa pele, são geradas microcorrentes de baixa intensidade que proporcionam alívio no local da dor.
Fisiocrem Patch Active é a solução eficaz indicada para o tratamento de dores musculares, articulares e contraturas de diferentes tipos.

4x
Patches

fisiocrem PATCH ACTIVE

ALIVIO DEL DOLOR MUSCULAR Y ARTICULAR
ALÍVIO DA DOR MUSCULAR E ARTICULAR



fisiocrem

PATCH ACTIVE

ALIVIO DEL DOLOR MUSCULAR Y ARTICULAR
ALÍVIO DA DOR MUSCULAR E ARTICULAR

4x
Producto sanitario
Dispositivo médico

CAPA/CAMADA EXTERNA
TIRAS DE COBRE & ZINC/ZINCO
CAPA/CAMADA INTERNA
ARNICA & HARPAGOFITO

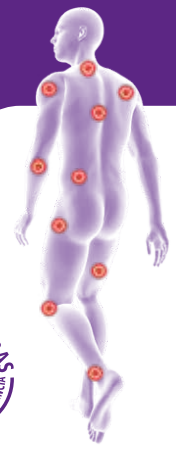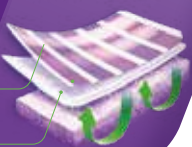

CN: 199657.2
CNP: 6633198

REF 17798/2010

01SPBX264099/2402
Rev.00 de 04/2020

